

HISTOPATHOLOGIE										
Type de prélèvements	Nature de l'examen/analyse	Principe de la méthode	Equipements	Conservation	Conditionnement/Acheminement	Délai d'exécution et modalités	Délai de réponse	Référence de la méthode	Accréditation (portée B flexible) OUI/NON	Date de création ou évolution de la technique
Prélèvement(s) tissulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, plastie. Téguments, muqueuses buccales et génitales, ongle, cuir chevelu Pathologies tumorales ou inflammatoires Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Examen histologique standard HES (hématoxyline, éosine, safran) Observation morphologique de constituants tissulaires et cellulaires	Préparation du prélèvement : - Etude macroscopique, - Fixation, imprégnation et inclusion en paraffine du prélèvement (blocs), - Coupes et étalement (lames), - Coloration HES Identification morphologique par microscopie optique	Tables de macroscopie ventilées Automates de déshydratation Stations d'enrobage Automate de coloration Tissu Tek Prisma Monteuse de film Tissu Tek Film	Fixation au formol tamponné 4% Déshydratation enrobée de paraffine	Voir conditions conditionnement*: R_TR_RE02 Conditionnement et transmission des prélèvements (selon réglementation ADR)**	24 Heures pour les biopsies et 48 Heures pour les pièces opératoires minimum (sauf plasties mammaires et ongles)	2 à 3 jours ouvrés pour les biopsies 3 à 4 jours ouvrés pour les pièces opératoires	Réf. : R_MC_RE01 Macroscopie Méthode selon recommandations internationales de bonne pratique en ACP Réf. : R_TH_RE01 Les différentes colorations Techniques manuelles et automatisées Coloration H.E.S.	OUI	02/05/2015
Prélèvement(s) tissulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, plastie. Téguments, muqueuses buccales et génitales, ongle, cuir chevelu Pathologies tumorales ou inflammatoires Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine	Colorations spéciales (PAS, Orceine, Ziehl, Bleu de toluidine, Giemsa) / mise en évidence substances suspectées ou précision de structures tissulaires	Méthodes de réaction histochimique qualitative	Tables de macroscopie ventilées Automates de déshydratation Stations d'enrobage Automate de coloration Tissu Tek Prisma Monteuse de film Tissu Tek Film	Déshydratation enrobée de paraffine	Voir conditions conditionnement*: R_TR_RE02_Conditionnement et transmission des prélèvements (selon réglementation ADR)**	24 Heures (sauf plasties mammaires et ongles)	2 à 3 jours ouvrés pour les biopsies 3 à 4 jours ouvrés pour les pièces opératoires	Réf. : R_TH_RE01 Les différentes colorations Techniques manuelles et automatisées	NON	02/05/2015
Téguments, muqueuses buccale et génitale, Biopsies et pièces opératoires pathologie tumorale ou inflammatoire	Recherche présence Ag / visée diagnostique	Méthode immunohistochimique qualitative	Automate d'immunohistochimie : marque Ventana	Déshydratation enrobée de paraffine	Voir conditions conditionnement*: R_TR_RE02_Conditionnement et transmission des prélèvements (selon réglementation ADR)**	48 Heures	Délai de 2 à 4 jours supplémentaires	Réf. : R-TI-MOXX Technique automatisée	NON	29/04/2013
Téguments, muqueuses buccale et génitale, Biopsies et pièces opératoires pathologie tumorale ou inflammatoire	Recherche index de prolifération Ki67	Méthode immunohistochimique quantitative	Automate d'immunohistochimie : marque Ventana	Déshydratation enrobée de paraffine	Voir conditions conditionnement*: R_TR_RE02_Conditionnement et transmission des prélèvements (selon réglementation ADR)**	48 Heures	Délai de 2 à 4 jours supplémentaires	Réf. : R-TI-MOXX Technique automatisée	NON	29/04/2013
Biopsie cutanée ou muqueuse	Recherche présence d'IgG, d'IgA, et C3 ou d'amylose (thioflavine)	Méthode immunofluorescence directe qualitative	Automate d'immunohistochimie : marque Ventana/ microscope à fluorescence	Frais conservé à + 4°C liquide de Mitchel, Déshydratation enrobée de paraffine	Voir conditions conditionnement*: R_TR_RE02_Conditionnement et transmission des prélèvements (selon réglementation ADR)**	48 Heures	Délai de 2 à 4 jours supplémentaires	Réf. : R_TF_IN01 Technique d'immunofluorescence cutanée directe (IFD) Technique automatisée	NON	29/04/2013

* **Conditions de conditionnement** : un livret est fourni à chaque correspondant spécifiant les conditions de conditionnement, conservation et transmission des prélèvements

**ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (réglementation)